

	TÍTULO: <b>PROCLINIC ESPONJAS HEMOSTÁTICAS 40 u.</b>	CÓDIGO: <b>FT-SGC051.01</b>
	FECHA DE EMISIÓN: <b>31/ENE/2020</b>	REEMPLAZA: <b>N/A</b>
		No. PÁG.: <b>1 de 3</b>

## CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

<b>Realizado por:</b> MARÍA DEL PILAR MARÍN LEBRÓN <small>Firmado digitalmente por MARÍA DEL PILAR MARÍN LEBRÓN Fecha: 2020.01.31 13:27:25 +01'00'</small>	<b>Revisado/Aprobado por:</b> RAMÓN VICENTE ORTEGA DAMIANO <small>Firmado digitalmente por RAMÓN VICENTE ORTEGA DAMIANO Fecha: 2020.01.31 13:29:25 +01'00'</small>
<b>Firma/fecha</b>	<b>Firma/fecha</b>

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

*Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.*

## 1. CARACTERÍSTICAS

ESPONJAS HEMOSTÁTICAS es una esponja de gelatina liofilizada, de forma cúbica, de peso no inferior a 10mg. ESPONJAS HEMOSTÁTICAS presenta una acción hemostática, cicatrizante y es completamente reabsorbible por el organismo en un período de 15 días. Se presenta listo para uso, y acondicionado individualmente en blíster.

Producto Estéril - Esterilizado por irradiación.

## 2. FINALIDAD

ESPONJAS HEMOSTÁTICAS está especialmente indicado en cirugías por su alto poder hemostático y cicatrizante.

Debe aplicarse ESPONJAS HEMOSTÁTICAS en la cavidad donde se quiere obtener la hemostasia. ESPONJAS HEMOSTÁTICAS debe aplicarse como un tampón hemostático absorbible, con la finalidad de reducir la hemorragia. Su estructura porosa proporciona una gran capacidad de absorción de fluidos, absorbiendo un mínimo de 35 veces su peso. Se sabe que un coágulo se forma por aglutinación local de las plaquetas sanguíneas en la zona de la hemorragia, por la consecuente activación de la cascada de los factores de coagulación. ESPONJAS HEMOSTÁTICAS proporciona una matriz que sirve de refuerzo adicional al coágulo formado. Con excepción de este efecto local, el producto no tiene otros efectos farmacodinámicos.

## 3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase III.

## 4. PRESENTACIÓN

ESPONJAS HEMOSTÁTICAS envase con 40 esponjas de 10X10X10

## 5. NÚMERO DE REFERENCIA

06-066: PROCLINIC esponjas hemostáticas caja 40 u.

## 6. MODO DE EMPLEO

- Aplicar ESPONJAS HEMOSTÁTICAS en la cavidad donde se pretende la obtención de la hemostasia.
- Mantener en el alvéolo hasta su completa absorción, que sucede en un período de 15 días.

## 7. ADVERTENCIAS

- No existen riesgos conocidos por la utilización del producto.
- Producto destinado a ser utilizado por profesionales cualificados.
- Producto suministrado estéril.
- Manipular con instrumentos esterilizados.
- No utilizar si el envase presenta roturas.
- Las unidades deben ser manipuladas con pinzas o tijeras esterilizadas
- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Consultar Hoja de Seguridad para más información.

## 8. IMAGEN

