
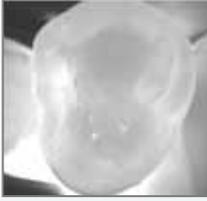
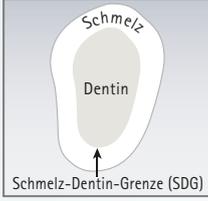
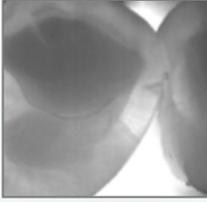
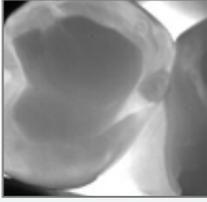
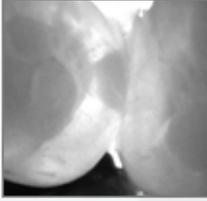
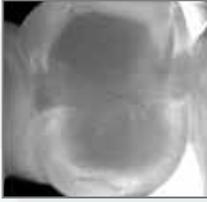
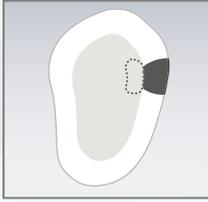


Clasificación de resultados de DIAGNOcam

Universidad de Múnich (Ludwig-Maximilians-Universität München) 2013

Descripción	DIAGNOcam	Extensión clínica (posible extensión de dentina en puntos)	Propuesta de tratamiento
0 Superficie dental sana			Seguimiento y prevención
1 Primeras señales visibles de una caries en esmalte dental			Seguimiento y prevención de las caries
2 Caries de esmalte dental establecida			Seguimiento y prevención de las caries
3 Caries de esmalte dental establecida con contacto puntual de la conexión amelodentinaria (CAD)			Seguimiento y prevención de las caries
4 Caries de dentina debido a una caries de esmalte establecida con contacto superficial de la conexión amelodentinaria (CAD)			Procedimiento invasivo* (mínimo)
5 Caries de dentina en proceso avanzado			Procedimiento invasivo*

* Se recomienda realizar radiografías de aleta de mordida, para valorar la relación de la extensión de la caries en la dentina.
Prevenición: control de la placa bacteriana, aplicación de flúor, infiltración de caries, etc.

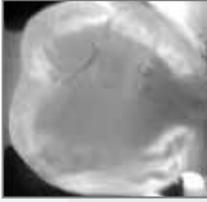

KaVo. Dental Excellence.