

FICHA TÉCNICA

PINZA CON CIERRE 651		
REFERENCIAS	0703	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Carl Martin GmbH Neuenkamper Strabe 80-86 42657- Solignen Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	- Acanalada para endodoncia. - Pinza con cierre. - Estriada	
ESPECIFICACIONES	15 cm.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	Una unidad.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.	
ESTERILIZACIÓN	<p>Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Los instrumentos deben sumergirse en agua fría durante al menos 5 minutos y limpiarse con un cepillo suave hasta que no queden residuos visibles. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que solo se utilicen procesos de esterilización con calor húmedo (esterilización con vapor) con los que sea posible un proceso de esterilización validado según las especificaciones de DIN EN ISO 17665-1: 2006. - Procesos en esterilizadores de vapor pequeños según DIN EN 13060 y Procedimiento en grandes esterilizadores según EN 285. <p>Ventilación: vacío previo fraccionado Esterilización: 134°C, 5 minutos Secado: min. 15 minutos</p>	

FICHA TÉCNICA

FINALIDAD	Pinzas de gabinete con puntas dentadas para mejorar el agarre.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.