

FICHA TÉCNICA

ENDO-M-BLOCK		
REFERENCIA	1417	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl Chemin du verger, 3 Ch-1338 Ballaigues , Suiza Tel. +41 21 843 92 92	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Es un sistema modular que permite la organización y el almacenamiento de limas y otros instrumentos utilizados en tratamientos de conductos radiculares. Características: -Esterilizable en autoclavable.	
ENVASE	Contiene una unidad.	
COMPOSICIÓN	Aluminio.	
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Se recomienda realizar una esterilización con vapor a 134 °C durante 18 minutos para desactivar los priones potenciales. Deje que los instrumentos se sequen. Antes de guardarlos, compruebe que están secos.	
FINALIDAD	Su diseño está orientado a maximizar la eficiencia y la accesibilidad durante los procedimientos endodónticos.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.