

FICHA TÉCNICA

RIVA COAT BOTELLA		
REFERENCIAS	63551	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SDI LIMITED 3-15 Brunsdon street Bayswater, Victoria 3153 Australia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Riva Coat está diseñado para prevenir la contaminación (por saliva y agua) de las superficies expuestas de los cementos de ionómero de vidrio durante las primeras 24 horas, inmediatamente después de su colocación. Indicaciones: Para los cementos de ionómero de vidrio que requieren un recubrimiento después de su colocación.	
COMPOSICIÓN	Dimetacrilato de 2,2'-etilendioxidietilo y bismetacrilato de 7,7,9(o 7,9,9)-trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa5,12-diazahexadecano-1,16-diilo.	
PRESENTACIÓN	Botella de 5 ml.	
VIDA ÚTIL	2 a 3 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD	Es un material protector utilizado principalmente en odontología para sellar y proteger restauraciones dentales, específicamente aquellas realizadas con materiales de ionómero de vidrio.	
INSTRUCCIONES DE USO	1. Coloque el cemento de ionómero de vidrio de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 2. Cuando la restauración haya endurecido, aplique Riva Coat a todas las superficies expuestas de la restauración. 3. Fotocure durante 20 segundos. 4. Recoloque la tapa inmediatamente después de utilizarlo.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenarlo en un lugar oscuro y a temperaturas entre 2° y 25°C (35°-77°F). Utilícelo a temperatura ambiente entre 20° y 25°C (68-77°F).	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.