



Un sistema, tres colores,
un composite fluido
simplificado para todo
tipo de cavidades



Composite
Solventum™ Filtek™
Easy Match Fluido

- ✓ Selección intuitiva de color
- ✓ Para todo tipo de cavidades
- ✓ Opacidad naturalmente adaptable
- ✓ Aplicación prácticamente sin burbujas

Simple y fácil

Con solo tres colores, Bright, Natural y Warm, el composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido simplifica la selección del color: solo tiene que observar y buscar la coincidencia usando la intuición.


Gracias a su opacidad naturalmente adaptable, proporciona una translucidez parecida a la del esmalte en el bisel y el borde incisal, y una translucidez parecida a la de la dentina en el resto, sin necesidad de bloqueador.

- Prácticamente sin burbujas ni desperdicio de material.
- Selección de color rápida e intuitiva tanto para restauraciones anteriores como posteriores.
- Un inventario optimizado reduce el desperdicio en colores de uso poco frecuente.



Indicaciones de uso

Incrementos de hasta 2 mm

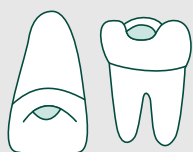

Clase I



Clase II



Clase III



Clase IV



Clase V



Base



Protección de la cavidad



Reparación indirecta (pequeños defectos)



Reparación directa¹



Sellador de fosas y fisuras

¹ Reparación de materiales provisionales de resina y acrílicos

Con opacidad naturalmente adaptable

Proporciona una translucidez parecida a la del esmalte donde se necesita y una translucidez parecida a la de la dentina en el resto, sin necesidad de utilizar bloqueador.

Comparación de composites fluidos



Comparación de composites universales




Fuente sobre el composite fluido: datos internos de Solventum. Tokuyama OMNICHROMA FLOW #121E04, Tokuyama OMNICHROMA® Blocker Flow: n.º 142A35, Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido: #10777361.

Fuente sobre composite en pasta: datos internos de Solventum. Tokuyama OMNICHROMA® Lote n.º 098E53, n.º 002EY8; Composite universal 3M™ Filtek™ Easy Match Lote n.º 9533695, n.º NE57998.

El composite universal 3M™ Filtek™ Easy Match y el composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido presentan el mismo comportamiento de grosor y valor, y superan a los sistemas de un solo color, tanto en formato de pasta como fluido.

El grosor del composite está correlacionado con el valor.

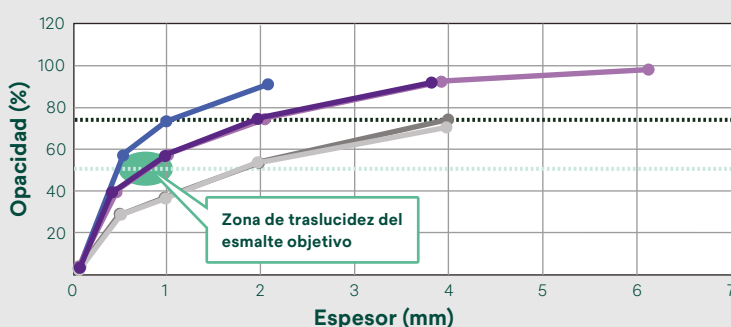

El composite universal 3M™ Filtek™ Easy Match presenta una opacidad similar a la de la dentina con grosores >2 mm

Valor de la dentina

Valor del esmalte

El composite universal 3M™ Filtek™ Easy Match muestra una translucidez similar a la del esmalte en espesores de 0,5 a 1 mm.

Composite 3M™ Filtek™ Supreme Ultra | Dentina

Composite universal Solventum™ Filtek™ Easy Match | Natural

Composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido | Natural

Tokuyama OMNICHROMA®

Tokuyama OMNICHROMA Flow

Fuente: datos internos de Solventum.

¿Cómo funciona? Con el poder de la opacidad naturalmente adaptable.


A diferencia de algunos sistemas de un sólo color, el composite Filtek Easy Match, tanto en forma de pasta como fluido, no necesita bloqueador para enmascarar la oscuridad de la cavidad oral en las restauraciones anteriores. Su opacidad naturalmente adaptable proporciona una translucidez similar a la del esmalte en grosores de 0,5 a 1 mm, exactamente donde se necesita para el bisel y el borde incisal. En grosores ≥ 2 mm, en cualquier otro lugar, ofrece una opacidad similar a la de la dentina.

Todos los composites se vuelven más translúcidos cuando se aplican en capas más finas. Pero la opacidad naturalmente adaptable de los composites Filtek Easy Match está alineada óptimamente tanto con la dentina como con el esmalte, lo que ayuda a la integración con la estructura dental circundante y proporciona un aspecto natural.

Selección intuitiva de color

El croma, o intensidad del color, es sólo uno de los componentes que ayudan a un buen ajuste de color. Incluso un composite del “color correcto” puede destacar de la dentición circundante si su valor (claridad/oscuridad relativa) u opacidad no coinciden también.

Juntos, los 3 colores del composite Filtek Easy Match abarcan los tonos de la guía VITA Classical sin necesidad de usar bloqueador.

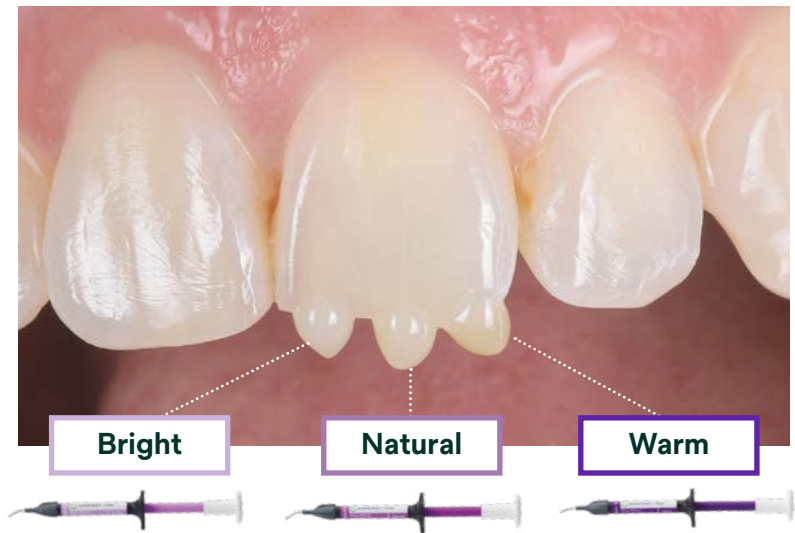

Principales ventajas que le encantarán en ambos materiales:

- Selección de color rápida, fácil e intuitiva.
- Opacidad naturalmente adaptable, sin necesidad de bloqueador.
- Sólo tres colores ofrecen un ajuste excelente al color de la sonrisa de la mayoría de pacientes.
- Un inventario simplificado ayuda a reducir el desperdicio de colores de uso poco frecuente.
- Tanto el composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido como su versión en pasta se pueden calentar de forma segura.^{1,2}

1 Caliente las cápsulas hasta 70 °C durante 1 hora como máximo.
2 Caliente las jeringas de composite fluido hasta 70 °C durante 1 hora como máximo, hasta 25 veces.

Una sonrisa Bright



Ejemplo representativo del color de diente **Bright**.



Bright: croma bajo, valor elevado.

Una sonrisa Natural



Ejemplo representativo del color de diente **Natural**.



Natural: croma y valor equilibrados, en el rango medio.

Una sonrisa Warm



Ejemplo representativo del color de diente **Warm**.



Warm: croma elevado, valor bajo.

Prácticamente sin burbujas ni desperdicio

En muchos composites fluidos se pueden introducir burbujas durante la dispensación. El composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido se ha diseñado para evitar esta situación y lograr una dispensación prácticamente sin burbujas ni desperdicio de material, para mejorar el control.

Funciona gracias a un diseño interior que minimiza las turbulencias y la entrada de aire por dos vías:

1. Diseño de la jeringa

Mediante un canal diseñado específicamente en el pistón, el aire puede escapar durante el proceso de relleno de las jeringas de composite que tiene lugar en las instalaciones de producción de Solventum. Esto evita que quede aire atrapado en la jeringa, lo que podría provocar burbujas y material que “se escape”.



2. Diseño de las puntas

Gracias a la pared interior lisa y cónica de la punta, que corresponde con el ángulo cónico de la jeringa, el material puede fluir a través de la punta de nuevo diseño sin atrapar aire.

vs

El diseño interior liso de la punta de la jeringa Solventum ayuda a evitar que quede aire atrapado.

Las puntas estándar de composite fluido pueden tener un diseño angular donde puede quedar aire atrapado en el material.

Tokuyama Estelite Universal Flow Super Low	Tokuyama OMNICHROMA FLOW
VOCO GrandioSO Heavy Flow	Ivoclar Tetric EvoFlow®
Dentsply Sirona TPH Spectra® ST Flow	Kerr Herculite™ Ultra Flow

Composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido

Composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido



Nº de referencia	Descripción
Bright	
6225B	2 Jeringas, 2 g cada una 1 Bolsa de puntas / 20 unidades
Natural	
6225N	2 Jeringas, 2 g cada una 1 Bolsa de puntas / 20 unidades
Warm	
6225W	2 Jeringas, 2 g cada una 1 Bolsa de puntas / 20 unidades
Kit de introducción	
6225K	3 Jeringas, 2 g cada una: 1 de cada uno de los colores Bright, Natural y Warm 2 Bolsas de puntas / 20 unidades

Composite Universal 3M™ Filtek™ Easy Match



Nº de referencia	Descripción
Bright	
6210B	20 Cápsulas, 0.2 g cada una
6220B	1 Jeringa, 4 g cada una
Natural	
6210N	20 Cápsulas, 0.2 g cada una
6220N	1 Jeringa, 4 g cada una
Warm	
6210W	20 Cápsulas, 0.2 g cada una
6220W	1 Jeringa, 4 g cada una
Kit de introducción	
6210K	60 Cápsulas, 0.2 g cada una: 20 de cada uno de los colores Bright, Natural y Warm
6220K	3 Jeringas, 4 g cada una: 1 de cada uno de los colores Bright, Natural y Warm



- ✓ Rápido
- ✓ Fácil
- ✓ Portátil

¡Novedad! Tanto el composite Filtek Easy Match Fluido como su versión en pasta se pueden calentar con seguridad^{1,2} y son compatibles con **el calentador de composites Solventum™ Filtek™**.

6520K	Solventum™ Filtek™ Kit de calentador de composite. Incluye calentador con base calefactora y soporte para composite, cable USB-C fijo, enchufe de alimentación, adaptador para toma de pared y guía de inicio rápido.
-------	---

- 1 Caliente las cápsulas hasta 70 °C durante 1 hora como máximo.
- 2 Caliente las jeringas de composite fluido hasta 70 °C durante 1 hora como máximo, hasta 25 veces.



Solventum Dental Solutions
KCI Clinic Spain, S.L.U.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027
Madrid · España
solventum.com

Los composites Filtek™ de Solventum son productos sanitarios de uso exclusivo por profesional y ostentan un marcado CE (2797). Lea atentamente las instrucciones de utilización para un uso de forma segura y eficaz. Solventum US LLC. Noviembre 2026.

© Solventum 2026. Solventum, el logotipo de la "S" y Filtek son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Todas las demás marcas comerciales indicadas son marcas de servicio, marcas comerciales o marcas registradas de sus empresas respectivas. OMG2033955.